



ウォッシャー・ディスインフェクター

# ARNO


アルノ

ISO 15883 準拠



# 感染対策のプロが考える 新たな歯科領域のスタンダード

「ウォッシャーディスインフェクター アルノ」はタンパク質および汚染の除去を目的として洗淨、すすぎ、消毒、乾燥を自動で行う医療機器です。用手洗淨による作業者の感染リスクや作業時間を減らすだけでなく、大量の汚染器具を安全で確実に再生処理できます。

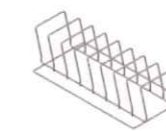

トレーラック



パーティカルラック



ブライヤーラック



内腔洗淨用ダクト



印象トレーラック



蓋付バスケット



デンタルバスケット



ダクトコネクター

内部の配置は自由自在  
歯科器材に最適なアクセサリを  
豊富にラインナップ



## 洗淨プログラム

合計 40 通りの洗淨プログラム  
標準洗淨プログラム 3 通り  
カスタムプログラム 37 通りを作成可能  
＜プログラム例＞  
・クイックプログラム（工程時間 約 45 分）  
・スタンダードプログラム（工程時間 約 60 分）  
・強力洗淨プログラム（工程時間 約 75 分）

## 熱水消毒

国際規格 ISO 15883 準拠  
Ao 値 3000 以上の熱水消毒を実現し、  
（93°C/2.5 分、90°C/5 分 など）  
芽胞を除く病原微生物を消毒します  
※ ISO 15883 では手術器械に Ao 値 600 を  
適用すること、また手術器械に用いるウォッシャー  
ディスインフェクターの性能に Ao 値 3000 以上を  
達成できることを求めています

## 乾燥

ハンドピース等の内腔器材にも対応  
※別途アクセサリが必要です  
乾燥温度・時間のカスタマイズが可能

## HEPA FILTER

乾燥時の空気も清潔に  
HEPA フィルターを搭載し外部からの  
埃・細菌・ウイルスをシャットアウト

## アタッチメント

超音波スケーラーチップ用アクセサリ  
（最大 8 本対応）など豊富なアタッチメントを  
用いて様々な形態の内腔器具に対応

## 内腔洗淨

ハンドピース（最大 12 本）に対応  
※別途要オプション

販売名 ウォッシャー・ディスインフェクター アルノ

クラス分類 医療機器クラス I (器具除染用洗浄器)

医療機器届出番号 13B2X10166000017

本体重量 65kg


外形寸法 W595mm - D520mm - H600mm  
(扉開時最大: D855mm)

洗浄槽 W428mm - D370mm - H415mm

一次側設備 電源 200V 単相・20A  
給水・給湯・排水  
RO 接続可 (オプション)



プログラム	予備洗浄 温度 時間	洗浄 温度 時間	すすぎ 温度 時間	熱水消毒 温度 時間	乾燥 温度 時間
クイックプログラム (約 45 分)	-	55°C 300 秒	- 60 秒	90°C 300 秒	125°C 600 秒
スタンダードプログラム (約 60 分)	120 秒	55°C 600 秒	- 120 秒	90°C 300 秒	125°C 1200 秒
強力洗浄プログラム (約 75 分)	120 秒	60°C 600 秒	- 180 秒	90°C 300 秒	125°C 1440 秒

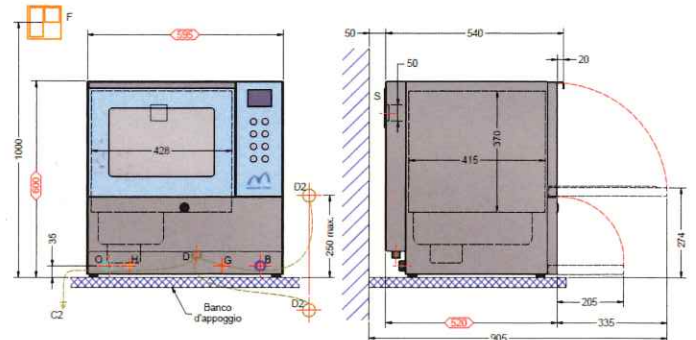

-  耐薬品二重ガラス
-  ステンレススチールのデザイン
-  人間工学に基づいたハンドル
-  ドアロック安全システム
-  カラーグラフィックディスプレイを備えたタッチコントロールパネル
-  警報チェックシステム
-  カスタマイズ可能なプログラム
-  マルチカラーLEDライト
-  リアルタイム水圧制御による確実な洗浄
-  正常動作監視システム
-  プログラムを記録するプリンター接続可能
-  フィルター掃除センサー
-  安全で効率的なヒーター内蔵
-  蒸気凝縮システム
-  自動洗剤注入・管理
-  洗剤補充アラート
-  RS232 ポート接続
-  USB ポート接続
-  HEPA H14フィルターによる乾燥